

# TERMÔMETRO DIGITAL

O Termômetro Digital (Human Flu Thermometer) realiza a medição de temperatura do corpo humano, é um termômetro infravermelho com alta sensibilidade, ampla faixa de detecção, velocidade e alta precisão.



## INFORMAÇÃO DO PRODUTO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO	CC 3V (2x PILHAS AAA NÃO INCLUSAS)
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	90G
TAMANHO DO PRODUTO	138 x 95 x 40MM (C x L x A)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FAIXA DE TEMPERATURA CORPORAL	32°C A 42,9°C
PRECISÃO	±0,3°C
TEMPO DE RESPOSTA	0,5 A 2 SEGUNDOS
RESOLUÇÃO	0,1°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20°C A 55°C
UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO	≤93%
DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO	3CM A 5CM
MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO	50 MEDIÇÕES

## OPERAÇÃO - COMO UTILIZAR?

- 1 - Insira as duas pilhas AAA no produto.
- 2 - Depois de colocada as pilhas aperte uma única vez o gatilho de medição e espere por 3 segundos os dígitos aparecerem no display.
- 3 - Com o botão de ajuste MODE selecione como desejado o que se quer medir: BODY TEMP (temperatura corporal) ou OBJECT TEMPERATURE (temperatura de objeto).
- 4 - Com o botão de ajuste SET selecione como desejado a opção de medida que deseja trabalhar em °C (Celsius) ou em °F (Fahrenheit).
- 5 - Aponte o alvo que deseja medir com uma distância de 3cm a 5cm e segure o gatilho de medição, a temperatura do alvo será mostrada no display.
- 6 - Para ver a última medição realizada basta pressionar uma vez o botão de ajuste MEMO. Para apagar a memória do termômetro é necessário pressionar por 5 segundos o botão de ajuste MEMO até aparecer no display o código "CLr".

## FUNÇÕES DO DISPLAY



- A - Indicação de volume On/Off
- B - Indicação da bateria
- C - Leitura de temperatura
- D - Indicação do objeto de leitura
- E - Unidade de temperatura

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Quando tomar medição, obtenha maior precisão mantendo uma distância de 3cm a 5cm ao apontar o termômetro para a testa da pessoa, então segure o gatilho para obter a leitura de temperatura.



**Distância de Medição**